

# ASM

## 100

Instrukcja obsługi




# Spis treści

<b>Części aparatu</b>	3
<hr/>	
<b>H/W Parts</b>	
Funkcje urządzenia	4
Włączanie	5
Wymiana obiektywów	6
<hr/>	
<b>Ustawienia syst.</b>	
Data i czas	7
Wi-Fi	9
<hr/>	
<b>Aplikacja</b>	
Ustawienia aplikacji	10
Klient	11
Nawilżenie	12
Sebum	13
Pory	14
Melanina	15
Acne/stany zapalne	16
Zmarszczki	17
Wrażliwość	18
Podsumowanie	19
Wysyłanie wyniku -Email	20
Mirroring	21
Podgląd	23
<hr/>	
<b>Gwarancja</b>	24


# Części składowe



Skin lens  
(objektyw ASM 100)

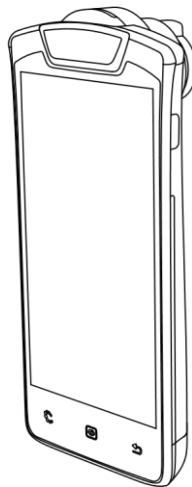


Aparat  
(ASM 100)

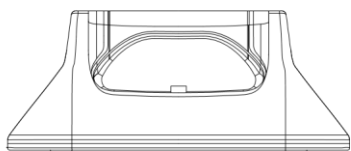


Cradle




Sebum paper  
(100ea)

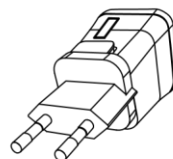


Charger

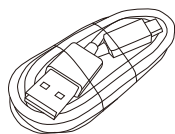


Kabel USB

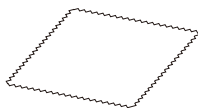

Ściereczka

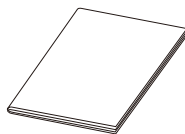


Instrukcja

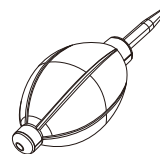

Dmuchwaka

## Funkcje aparatu

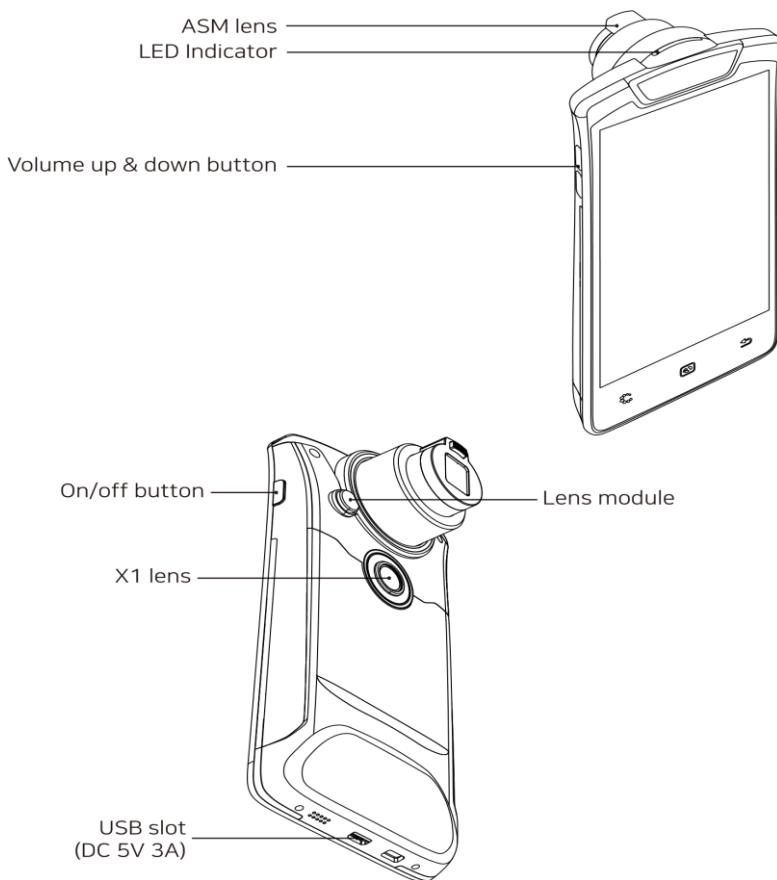


### **UWAGA:**

Nie dopuszczaj do rozładowania się baterii! W przerwach w badaniu zawsze odkładaj aparat na podstawę i ładuj baterię! Bateria to lubi.. i jednocześnie ryzyko upadku aparatu na podłogę jest mniejsze!!! Nie przeprowadzaj badania z włączonym kablem zasilającym bezpośrednio do aparatu – jest ryzyko mechanicznego uszkodzenia gniazda ładowania!



# Włączanie

Aby włączyć aparat

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, po chwili zapali się na biało LED 2

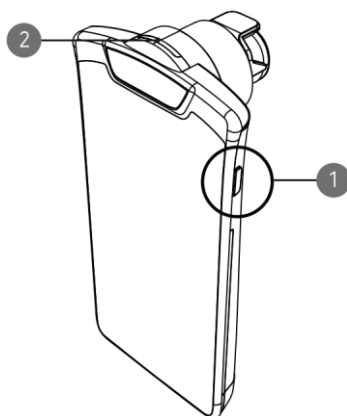


Naciśnij klawisz wtyczki

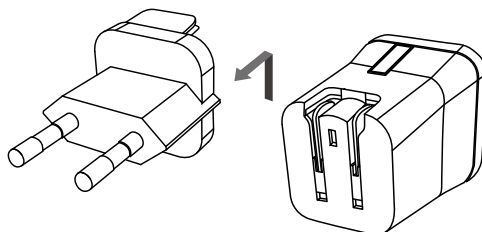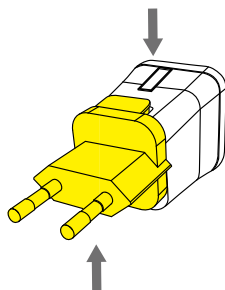


● wybierz wtyczkę sieciową odpowiednią do regionu i podłącz kabel USB.

## Zmiana obiektywu

- Naciśnij klawisz pod obiektywem aby go odblokować.

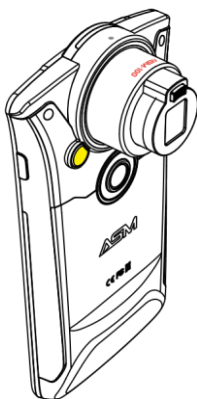

- Aby zdjąć obiektyw- naciśnij przycisk zwalniający i obróć obiektyw około 45 stopni w lewo.

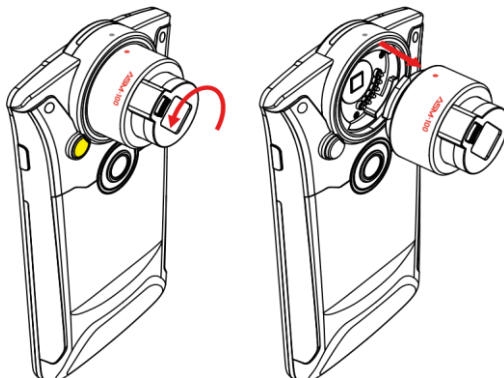


## Zakładanie obiektywu


- Jeżeli założony jest niewłaściwy obiektyw indyktor na ekranie będzie błyskał..



- Przyłóż obiektyw do aparatu dopasowując czerwone kropki na aparacie i obiektywie, obróć lekko w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.

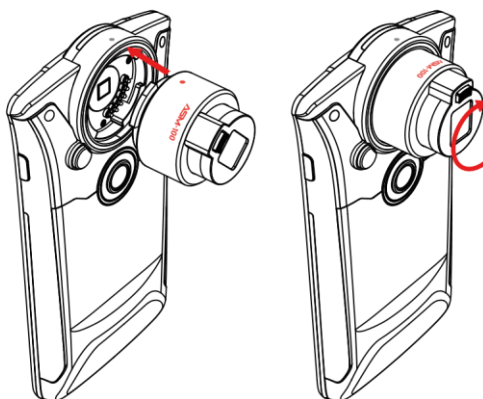


## Data i godzina

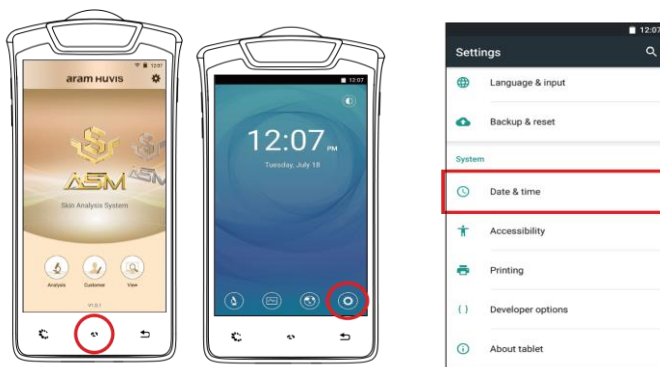


- 1  Touch .
- 2 Go to "Date & time"

Wyjdź z aplikacji, kliknij "Ustawienia", Idź do daty/ godziny

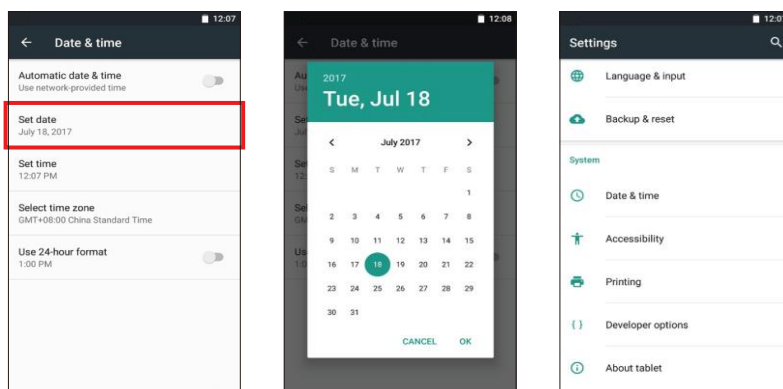


- 4 Wybierz "Set date"
- 5 Ustaw datę i Kliknij "OK".
- 6 Sprawdź czy ustawienia są prawidłowe


# Ustawianie godziny

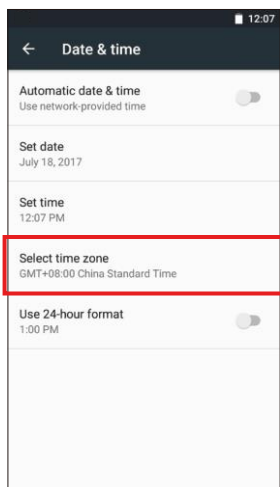


7 Wybierz "Select time zone" (strefę czasową)

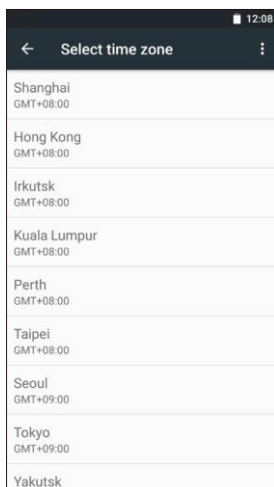


8 Wybierz właściwą strefę.

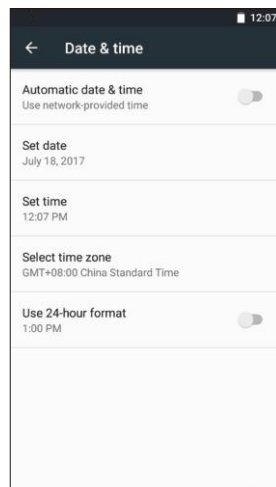


9 Sprawdź poprawność ustawień.

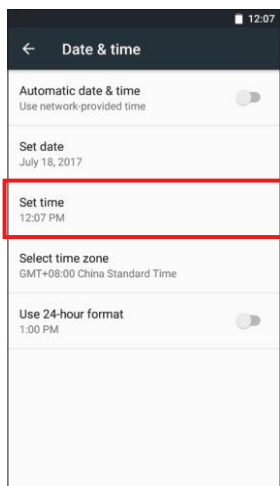

10 Wybierz "Set time". (ustaw czas)

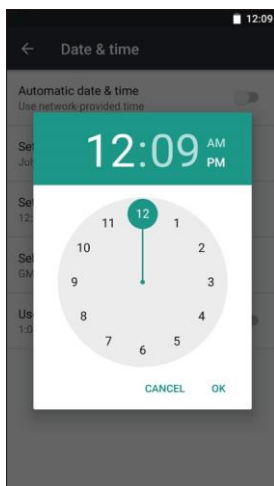

11 Ustaw godzinę i potwierdź "OK"

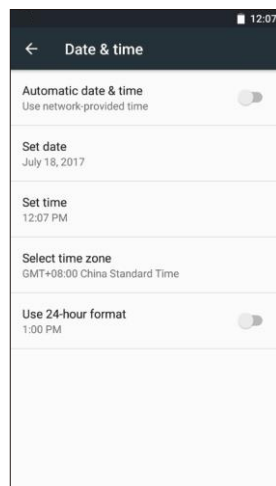

12 Sprawdź poprawność




## Wi-Fi (połączenie z Internetem – do wysyłania rezultatów itp.)


**UWAGA:** Aparat może się łączyć z TWOIM WiFi – wysyła maile z wynikami, sprawdza aktualizacje itp. **ALBO** może wysyłać swój sygnał WiFi – do połączenia się z innym ekranem komputera/tabletu itp. w celu dublowania obrazu dla klienta na większym ekranie (wtedy **NIE MA** internetu)




1 Wybierz klawisz.

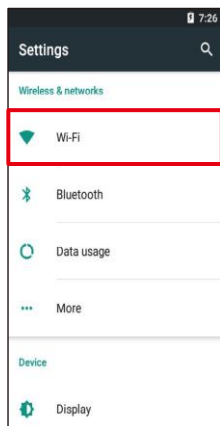


2 Wybirz

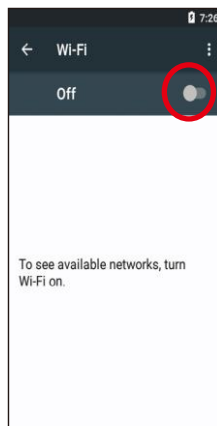


3 Włącz WiFi.

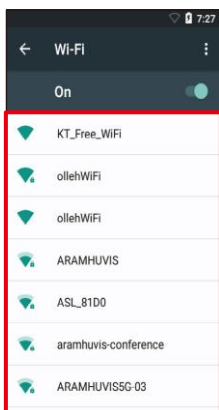

4

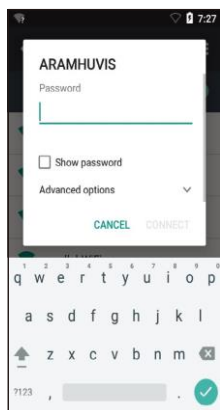

5 Wpisz hasło

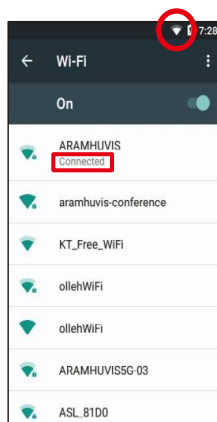


6 Czekaj na połączenie


# Ustawienia Aplikacji




1 Kliknij 

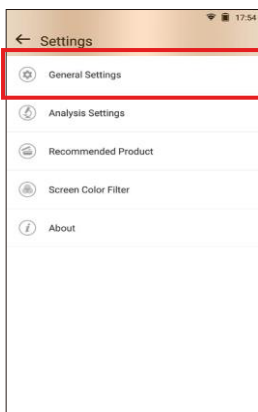

2 Wybierz "Ustawienia Ogólne".

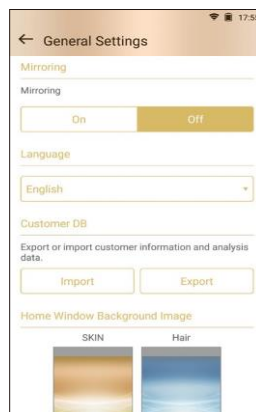


3 Ustawienia Ogólne

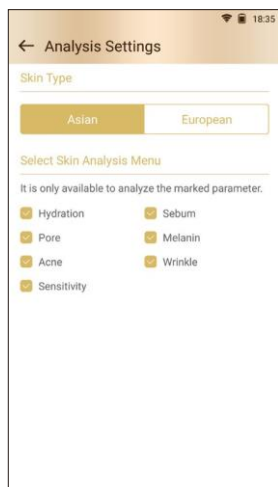

4 Ustawienia Analizy  
Ustaw typ skóry i zakres analizy.



5 Rekomendowane produkty  
Ustaw swoje produkty, które Program będzie polecał.

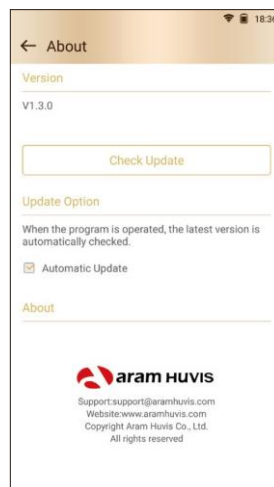

6 Sprawdź dostępność Aktualizacji programu.


## Klient (pacjent)




1 Wybierz "Pacjent".



2 Kliknij + aby wpisać Nowego pacjenta.

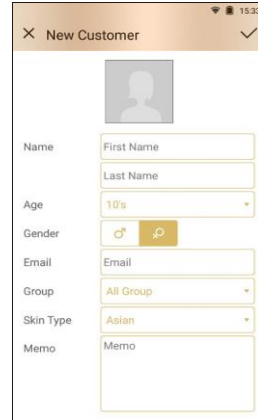


3 Wprowadź dane.

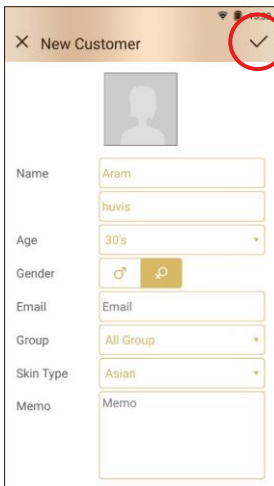

4 Zatwierdź/zapisz dane





5 Wybierz klienta

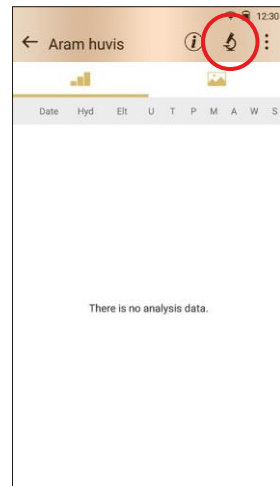

6 Kliknij  aby zacząć analizę


# Nawilżenie

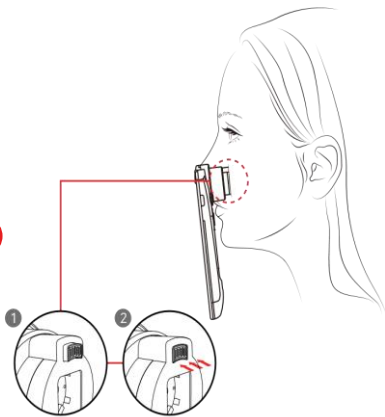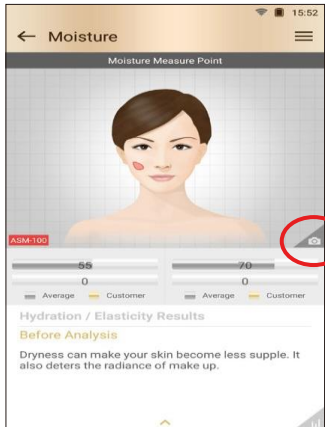

1 Kliknij

Zaczekaj na komunikat "Przyłóż do skóry".

Nie przykładaj do skóry zanim nie pojawi się na ekranie "Przyłóż do skóry". Sensor winien dotykać skóry całą powierzchnią

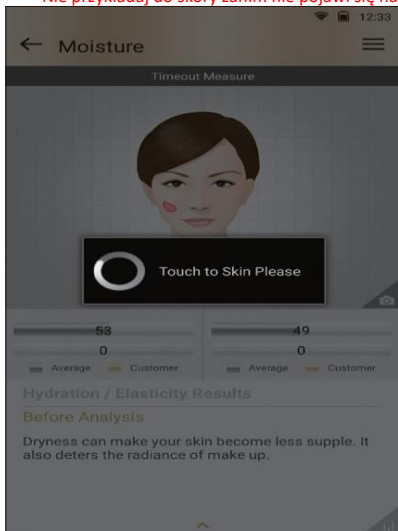


3

Nawilżenie jest analizowane




4


# Sebum

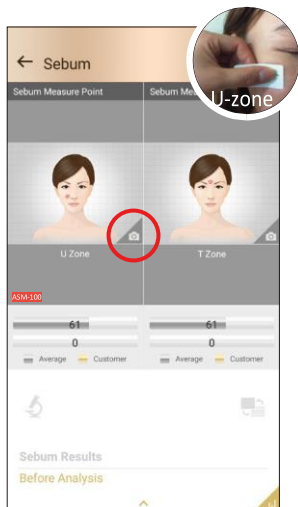


1 Przyłóż różowe pole testera sebum do strefy U Na ok. 2-3 sekundy.

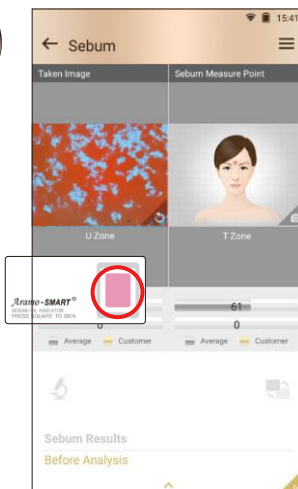


2 Zrób zdjęcie różowego Pola paska testowego.

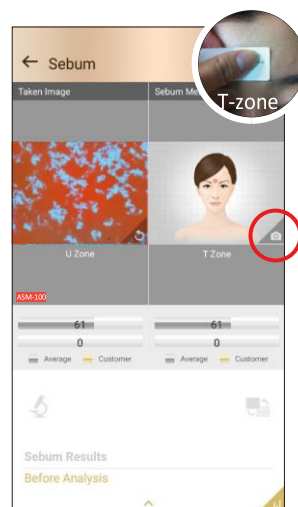


3 Powtórz to samo dla strefy T ( z nowym paskiem)

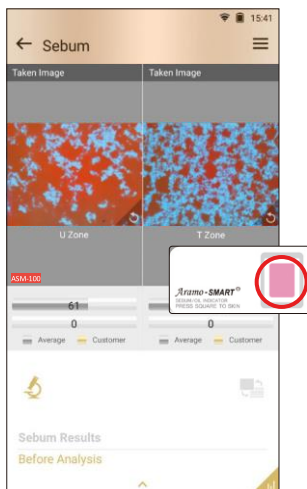

4 Zrób zdjęcie

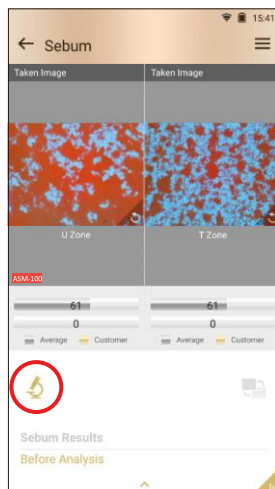


5 Kliknij

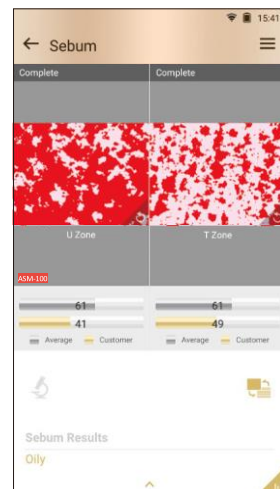


6 Wynik sebum na ekranie.


# Powiększone pory




1 Presuń ekran w lewo  
Kliknij  aby uruchomić kamerę.

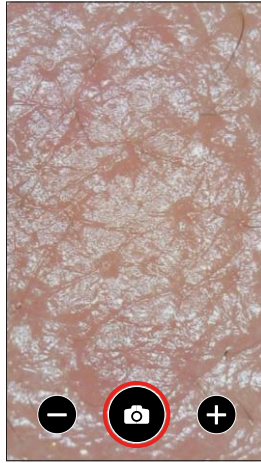

2 Wybierz miejsce  
Pomiaru, zrób zdjęcie

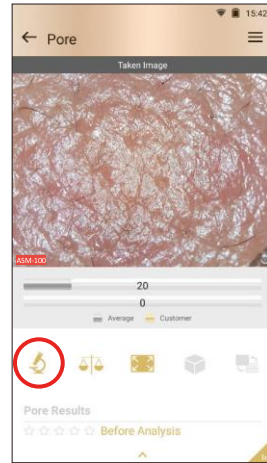

3 Kliknij  by

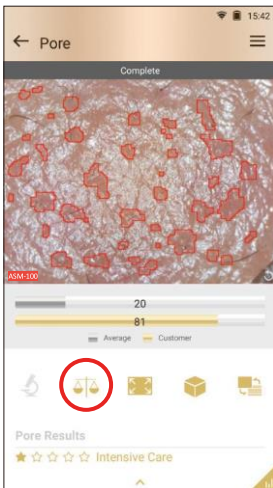

4 Program zaznacza pory  
Kliknij tu  aby  
Porównać z wzorcami




5 Porów  z wzorcami




6 Kliknij  aby przejść  
Do obrazu 3D


# Melanina

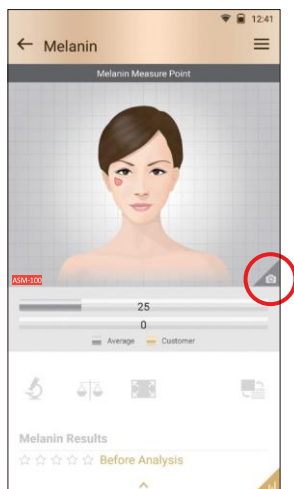


1 Przesuń obraz w lewo i kliknij aby uruchomić kamerę

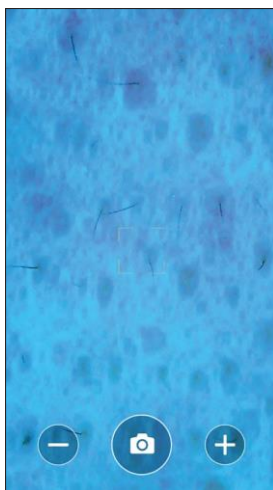

2 Wybierz miejsce pomiaru i zrób zdjęcie

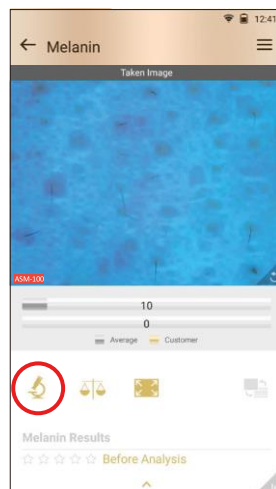

3 Kliknij aby dokonać analizy


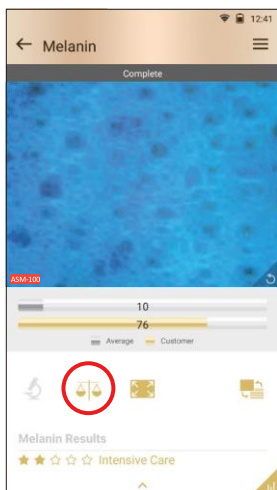


4 Kliknij aby porównać z wzorcowymi



5 Kliknij aby porównać z obrazami wzorcowymi. Możesz porównać z obrazami wzorcowymi

# Acne (Stany zapalne)

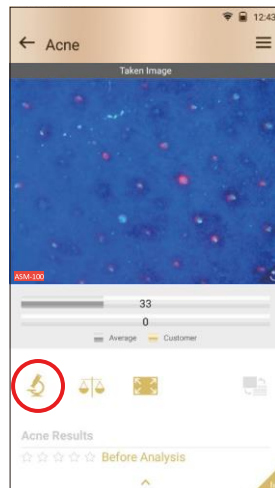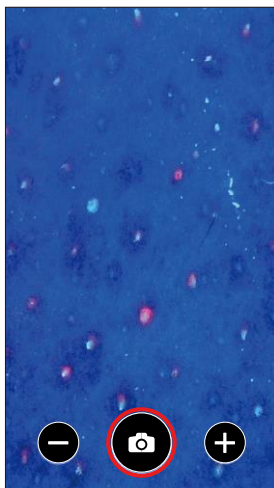

1 Przejdź do Acne  
Kliknij




włącz kamerę i zrób zdjęcie

2 Wybierz miejsce

Włóż kamerę i zrób zdjęcie

3 Kliknij aby zrobić analizę.

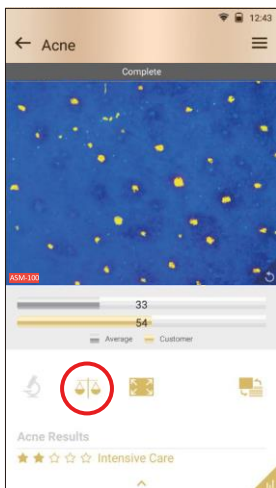

Pojawi się wynik – możesz




porównać z obrazami wzorcowymi



# Zmarszczki




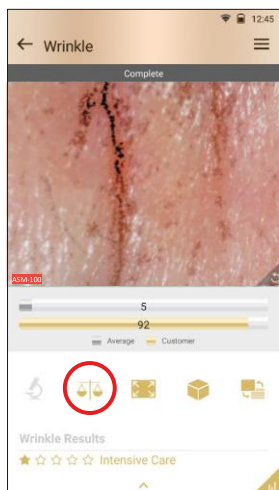
1 Przejdź do zmarszczek  
kliknij  aby włączyć



2 Zrób zdjęcie (dla  
zmarszczek najlepiej  
wybrać "kurze łapki")




3 Kliknij  aby  
zanalizować



4 Pojawi się wynik  
Możesz porównać z  
Obrazami wzorcowymi



5 Kliknij  aby  
Porównać z  
wzorcami

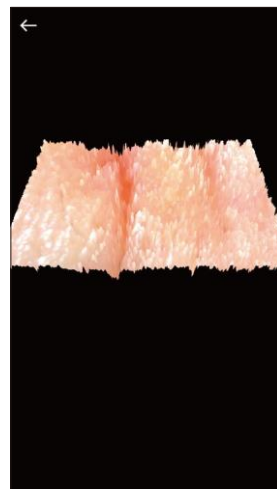


6 Kliknij  aby pokazać  
Obraz 3D


# Wrażliwość




1 Przesuń ekran w lewo  
Kliknij  uruchomić kamerę

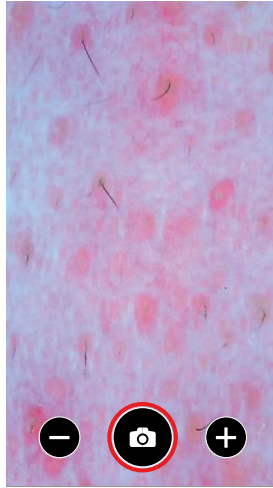

2 Wybierz miejsce  
I zrób zdjęcie

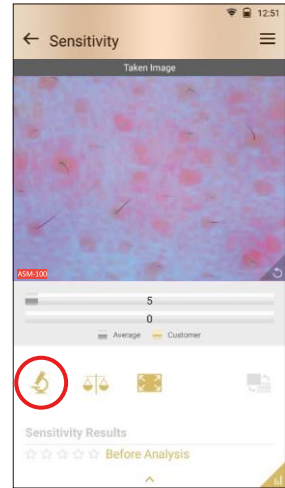

3 Kliknij  aby zanalizować

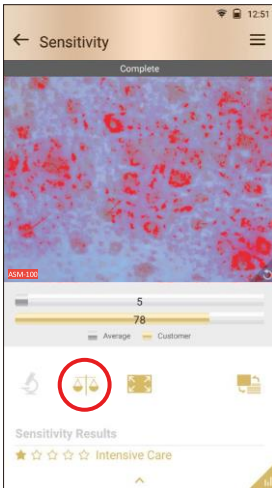


● Pokaże się rezultat Możesz porównać z wzorcami.





●  Porównanie z obrazami wzorcowymi

# Wyniki

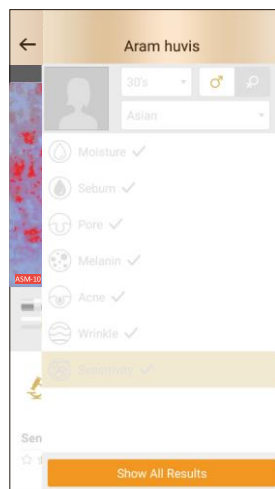


1 Kliknik  albo "Pokaż wyniki".

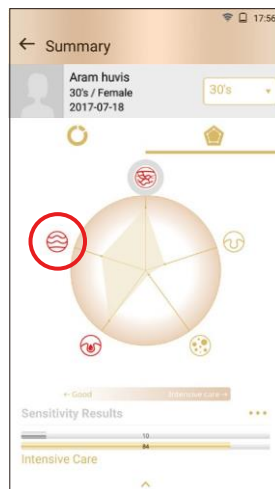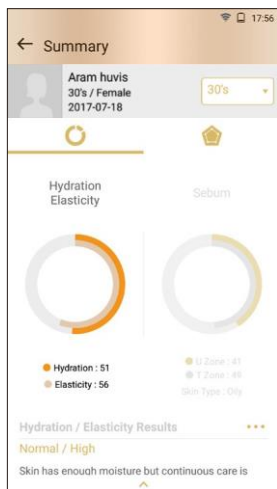

2 Wyniki – na czerwono obszary wymagające pielęgnacji


## Wyślij wynik e-mailem

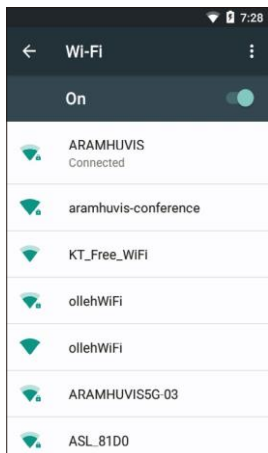


1 Upewnij się czy masz połączenie Wi-Fi.




2 Kliknij .

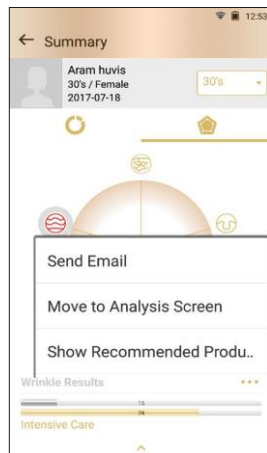


3 Wybierz „E-mail”

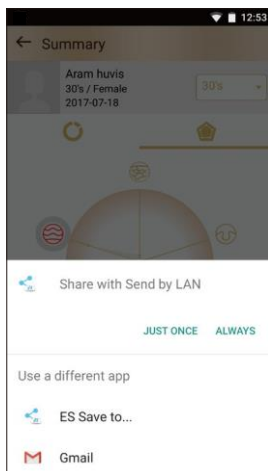

4 Wybierz e-mail

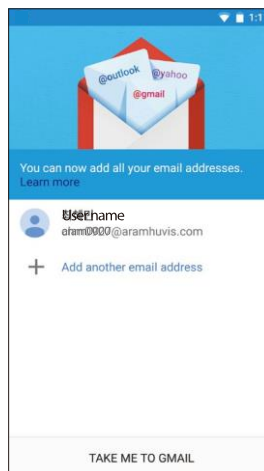

5 Wybierz konto.

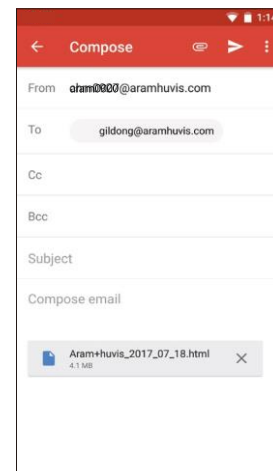


6 Wyślij

# Mirroring (dublowanie obrazu)



1 Kliknij   
(Ustawienia aplikacji)

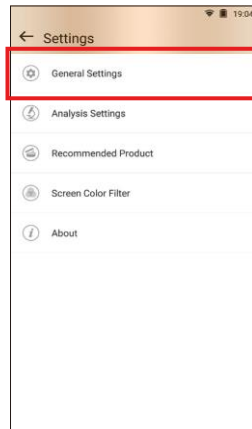

2 Przejdź do Ustawień ogólnych



W




3 Odczytaj kod aby pobrać  
Aplikację ARAMVIEWER  
znajdziesz ją również w sklepie  
Play, Apple Store oraz na  
[www.aramhuvis.com](http://www.aramhuvis.com)

Włącz mirroring



# Mirroring

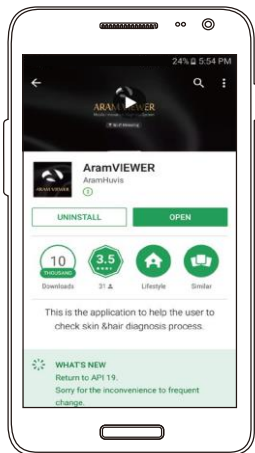


5 Zainstaluj "Aram Viewer"

Na komputerze/tel/tablecie  
be mirroring.



6 Przejdź do WiFi

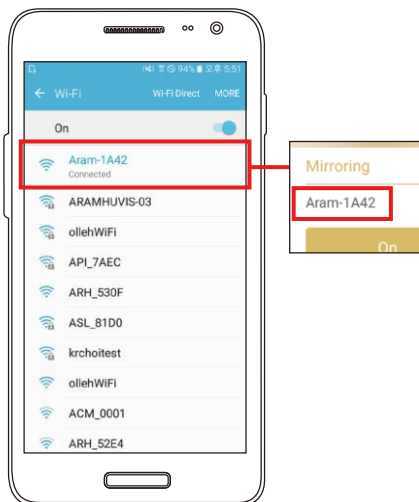

Wybierz WiFi od ASM-połącz




8 START i obraz zdublowany





# Tryb podglądu



1 Wybierz "View".

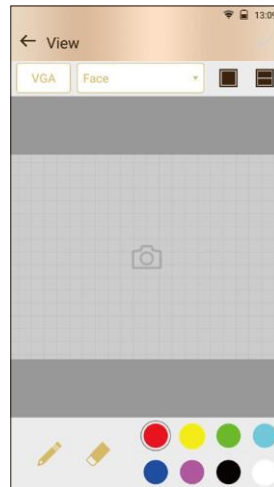

2 Możesz robić zdjęcie

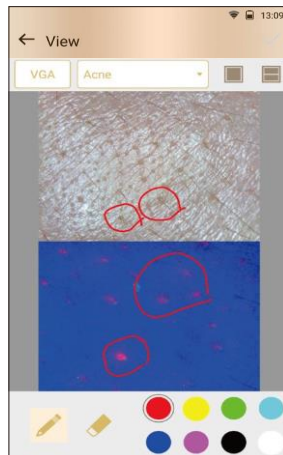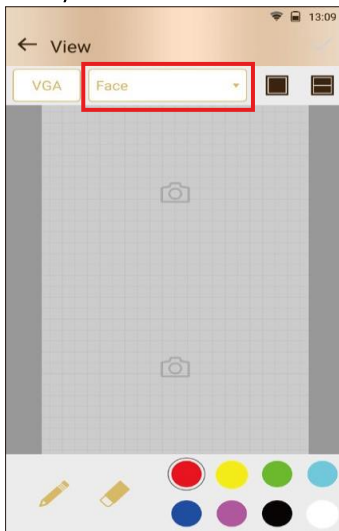

4 Możesz robić znaki w obrazie



# GWARANCJA

- 24 miesięczna gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie normalnej eksploatacji aparatu. Liczona jest od daty sprzedaży. Prosimy zachować dowód sprzedaży (faktura) wraz z numerem fabrycznym aparatu.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zalania, uszkodzenia baterii po kompletnym wyładowaniu.
- W przypadku wystąpienia problemów proszę kontaktować się z naszym punktem serwisowym tel 782 604 601, w przypadku braku możliwości usunięcia problemu drogą zdalną proszę wysłać dobrze zabezpieczony aparat do

**EURTEX PPHU**  
**SPECTRUM TOWER**  
**Twarda 18 (4 piętro)**  
**00-105 Warszawa**

Do przesyłki proszę dołączyć następujące informacje:

1. Adres zwrotny
2. Telefon kontaktowy
3. Krótki opis usterki
4. NIP firmy, na którą ma być wystawiona faktura w przypadku naprawy odpłatnej.



# Memo



## **HEAD OFFICE**

#401~402 Bundang Seoul National University Hospital Health Care Innovation Park, 172, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13605 Republic of Korea

## **PRODUCTION DIVISION & FACTORY**

#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Republic of Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: [info@aramhuvis.com](mailto:info@aramhuvis.com) <http://www.aramhuvis.com>

Wyłączny importer I dystrybutor:

**PPHU EURTEX, Dariusz Górak**

**Ul Skierniewicka 19/46**

**01-230 Warszawa**

**[www.eurtex.com](http://www.eurtex.com)**